



Настоящий документ не проверен экспертами на соответствие приказам Минздрава и может быть использован ТОЛЬКО для ознакомительного чтения

Как собрать защитную маску Prusa Face Shield - RC1/RC2/RC3

Степень сложности: средняя

Шаги: 6

Затраченное время: ?

Секции: 1

Шаг 1: Общая характеристика

• Данная инструкция объясняет, как собрать защитную маску, выпущенную Prusa Research в качестве средства индивидуальной защиты. Краткую инструкцию можно скачать здесь (на английском языке): [Как собрать защитную маску PDF](#)

ВНИМАНИЕ: Данная модель защитной маски в настоящее время проверяется специалистами!

i Рекомендована для однократного использования. Эффективность повторного использования после дезинфекции в настоящее время проверяется.

• Материалы для печати, включая описание вносимых изменений, доступны на сайте prusaprinters.org

• В моделях версии RC2 и далее необходимо аккуратно отделить друг от друга два наголовника, открепить четыре держателя и освободить крепление для защитного экрана.

• Для масок общего назначения возможно использование многослойной пленки вместо органического стекла. Смотрите инструкцию (на английском языке) [Как собрать защитную маску Prusa Face Shield RC1/RC2/RC3 общего назначения](#)

i Данная инструкция демонстрирует процесс сборки маски версии RC1. Принцип сборки версий RC2/RC3 идентичен.

Шаг 2: Подготовка деталей маски к сборке

ВНИМАНИЕ: Вымойте руки и рабочую поверхность перед началом сборки защитной маски. Выполните следующие шаги либо [сразу перейдите к Шагу 6](#) и посмотрите видеоинструкцию.

- **Приготовьте следующие детали:**
 - Верхняя часть – наголовник (1 шт.)
 - Нижняя часть – подбородок (1 шт.)
 - Эластичный ремешок с петлями (1 шт.)
 - Защитный экран из органического стекла (1 шт.)
- **Стекло с двух сторон покрыто защитной пленкой, аккуратно удалите ее.** Чтобы подцепить край пленки используйте нож или ногти.
- Рекомендуется собирать маску в перчатках.

Шаг 3: Крепление наголовника (верхней части) к защитному экрану

- Положите защитный экран перед собой, стороной с четырьмя отверстиями вверх. Положите наголовник у верхнего края защитного экрана четырьмя держателями (штырями) к экрану. Закрепите на них экран, начиная с центральной части.

Наголовник должен быть правильно размещен. Держатели должны располагаться по нижнему краю наголовника при креплении к нему экрана. Для ориентира используйте надпись "PRUSA" сбоку на изделии.

- i Для упрощения фиксации поместите руку между двумя наголовниками.
 - Прикрепите защитный экран к наголовнику, начиная со второго отверстия справа. Придерживайте место крепления большим пальцем.
 - Аккуратно соедините правую сторону наголовника с защитным экраном и вставьте второй держатель в следующее отверстие. После этого большой палец можно отпустить.

Настоящий документ не проверен экспертами на соответствие приказам Минздрава и может быть использован ТОЛЬКО для ознакомительного чтения

- В том же порядке зафиксируйте левую сторону наголовника. Распрямляйте наголовник, не сгибайте защитный экран.

Шаг 4: Крепление подбородка (нижней части) к защитному экрану

- Прижмите защитный экран верхней частью к телу или другой поверхности (поверхность должна быть чистой/продезинфицированной).
- Закрепите подбородок маски в три отверстия по нижнему краю защитного экрана. Прижмите две части подбородка друг к другу до щелчка.
- Проверьте, что подбородок полностью закреплен. Обе его части должны плотно прилегать друг к другу.

Шаг 5: Крепление эластичного ремешка и проверка изделия

- Любой конец эластичного ремешка закрепите петлей за выступающее крепление на конце наголовника.
- Аналогичным образом прикрепите другой конец эластичного ремешка к наголовнику. При необходимости отрегулируйте петлями длину ремешка.
- **Защитная маска готова!!! Продезинфицируйте маску перед использованием.**

i Как продезинфицировать маску: [статья на английском языке](#)

i Ваши предложения по улучшению изделия отправляйте нам на электронную почту covid@prusa3d.com. Спасибо ;)

Шаг 6: Видеоинструкция – как собрать защитную маску

- Чтобы собрать защитную маску, посмотрите данную видеоинструкцию.
- **Продезинфицируйте маску перед использованием.**

i Как продезинфицировать маску: [статья на английском языке](#)

i Ваши предложения по улучшению изделия отправляйте нам на электронную почту covid@prusa3d.com. Спасибо ;)